

HYABAK

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

INGREDIENTI:

Ialuronato di sodio, cloruro di sodio, trometamolo, sactinochinolo, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

PROPRIETÀ:

HYABAK è una soluzione ipotonica destinata all'instillazione sull'occhio o sulle lenti a contatto. Contiene acido ialuronico (agente lubrificante ed idratante) e actinochinolo (agente con proprietà anti UV).

HYABAK è consigliato:

- Per umidificare e lubrificare l'occhio in caso di secchezza o sensazione di affaticamento oculare provocate da fattori esterni quali vento, fumo, inquinamento, polvere, caldo secco, climatizzazione, viaggi in aereo, lavoro protratto al computer.

- Nei portatori di lenti a contatto, il prodotto consente di lubrificare e idratare la lente per facilitare la sua applicazione o rimozione e apportare una sensazione di un rapido comfort durante la giornata.

HYABAK grazie al sistema **ABAK®**, dispensa delle gocce di soluzione priva di conservanti. La soluzione può essere utilizzata con qualunque tipo di lente a contatto e, grazie all'assenza di conservanti, offre un elevato rispetto dei tessuti oculari.

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE:

PRODOTTO PER INSTILLAZIONE OCULARE.

Instillare una goccia in ogni occhio, ripetendo la somministrazione in base alle necessità nel corso della giornata. Portatori di lenti a contatto: instillare una goccia su ogni lente al momento dell'applicazione o della rimozione, ripetendo la somministrazione in base alle necessità nel corso della giornata.

Per una corretta utilizzazione del prodotto, è necessario adottare alcune semplici precauzioni:

- Lavare accuratamente le mani prima di procedere all'applicazione.
- Evitare il contatto dell'occhio o delle palpebre con il beccuccio del flacone. Instillare una goccia di **HYABAK** nel sacco congiuntivale, distendendo leggermente verso il basso la palpebra inferiore e guardando contemporaneamente verso l'alto. Il tempo di formazione di una goccia è più lungo che con un flacone classico. Richiudere il flacone dopo utilizzo. Applicazione di lenti a contatto: instillare una goccia di **HYABAK** nella concavità della lente.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Il flacone non deve essere conservato oltre 3 mesi dopo la prima apertura.

SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO:

- Non utilizzare **HYABAK** se allergico ad uno qualsiasi dei componenti.
- Evitare il contatto dell'occhio con il beccuccio del flacone.
- Non iniettare, non ingerire.
- Il filtro UV non sostituisce l'utilizzo degli occhiali da sole.
- È consigliabile distanziare di 10 minuti la somministrazione di due prodotti oculari.
- In caso di rottura dell'anello di protezione non utilizzare il prodotto.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

EFFETTI COLLATERALI O INDESIDERATI:

- Rara insorgenza di lievi irritazioni oculari.

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
--------	--------------------

CE MARK	€ 16,50
---------	---------

Collirio soluzione (flacone 10 ml)

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
--------	--------------------

CE MARK	€ 11,00
---------	---------

Collirio soluzione (flacone 5 ml)