

THEALOZ DUO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Protezione, idratazione e lubrificazione degli occhi nel trattamento della sindrome da occhio secco, di entità da moderata a grave.
Flacone ABAK® – Senza conservanti.

COMPOSIZIONE:

Trealosio 3 g, ialuronato sodico 0,15 g, Cloruro di sodio, Trometamolo, Acido cloridrico, Acqua per preparazioni iniettabili a 100 ml.

NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

Laboratoires THEA - 12 rue Louis Blériot - 63017 Clermont-Ferrand - Cedex 2 - Francia.

INDICAZIONI:

THEALOZ DUO contiene una soluzione da somministrare mediante instillazione nell'occhio o su lenti a contatto. THEALOZ DUO è raccomandato in caso di fastidio, bruciore o irritazione degli occhi. Tali sintomi possono essere causati da fattori esterni come per esempio vento, fumo, inquinamento, polvere, esposizione al sole o al freddo, caldo secco, aria condizionata, viaggi in aereo, lavoro protratto di fronte allo schermo del computer ecc. THEALOZ DUO non contiene conservanti e assicura il rispetto ottimale dei tessuti oculari: per questo può essere usato anche da chi porta lenti a contatto, indipendentemente dal tipo di lenti. Dà sollievo immediato, che dura tutto il giorno.

PROPRIETÀ:

THEALOZ DUO è una soluzione oftalmica acquosa ipotonica e con pH neutro, senza conservanti. Gli ingredienti principali sono trealosio, un disaccaride presente in molte piante e animali, e ialuronato sodico, un polisaccaride naturalmente presente nell'occhio. Le caratteristiche chimico-fisiche del trealosio conferiscono al prodotto proprietà protettive, antiossidanti e idratanti. Per tutti questi motivi è un elemento essenziale nel meccanismo dell'anidrobiosi osservato in alcuni micro-organismi (metabolismo rallentato che consente loro di sopravvivere alla disidratazione estrema). Il trealosio ha anche proprietà protettive e stabilizzanti delle membrane cellulari, prevenendo la denaturazione delle proteine e la degradazione dei lipidi, come pure proprietà antiossidanti. Lo ialuronato sodico è un polisaccaride naturale presente nell'occhio umano con proprietà uniche di ritenzione dell'acqua. Le notevoli proprietà di ritenzione dell'acqua garantiscono una migliore idratazione e lubrificazione della superficie corneale. Inoltre le caratteristiche bioadesive consentono una migliore aderenza del prodotto alla superficie oculare, dando sollievo a lungo e accorciando i tempi di guarigione dell'epitelio corneale. Grazie all'abbinamento unico di Trealosio e ialuronato sodico, THEALOZ DUO protegge, idrata e lubrifica a lungo la superficie oculare, per il massimo comfort. Per garantire la massima tollerabilità, THEALOZ DUO non contiene conservanti grazie al flaconcino ABAK® multidose. Questo dispositivo nuovo e brevettato consente la somministrazione di gocce oculari attraverso una membrana filtrante da 0.2 µm, che impedisce le contaminazioni batteriche della soluzione. La soluzione rimane quindi protetta e può essere usata per periodi fino a 3 mesi dopo l'apertura.

AVVERTENZE SPECIALI E PRECAUZIONI SPECIALI PER L'USO:

- Non usare in caso di allergia a uno dei componenti.
 - Non toccare la superficie dell'occhio con la punta del flaconcino.
 - Non iniettare e non inghiottire.
 - Non usare il prodotto se l'anello di protezione è danneggiato.
- TENERE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

INTERAZIONI:

In caso di applicazione di due prodotti oculari diversi, si raccomanda un intervallo di almeno 10 minuti.

COME USARE IL PRODOTTO:

METODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE: INSTILLAZIONE OCULARE.

- Lavarsi bene le mani prima dell'uso.
- Evitare di toccare gli occhi o le palpebre con la punta del flaconcino, soprattutto se si pensa di avere un'infezione agli occhi.
- Instillare una goccia nella sacca congiuntivale inferiore, tirando delicatamente verso il basso la palpebra inferiore e guardando verso l'alto.
- Rimettere il tappo dopo l'uso.

DOSAGGIO:

1 goccia in ogni occhio, 4-6 volte al giorno. THEALOZ DUO può essere usato anche indossando le lenti a contatto.
Confezione adatta per uso prolungato e quotidiano

EFFETTI COLLATERALI INDESIDERATI (EFFETTI AVVERSI):

Rara possibilità di lieve irritazione agli occhi.

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO:

Dopo l'apertura, non tenere il flaconcino per più di 3 mesi. Conservare il prodotto a temperatura inferiore a 25°C.

NON USARE IL PRODOTTO DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA CHIARAMENTE SULLA CONFEZIONE:

La data di scadenza si riferisce al prodotto nella confezione integra e conservato correttamente. Non usare il flaconcino se è danneggiato.

ISTRUZIONI AGGIORNATE AL:

02/2013.

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
CE 0459	€ 28,00

Collirio soluzione (flacone ABAK 15 ml)