

Zaspray®

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Questo prodotto è un dispositivo medico.

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Conservi questo foglietto illustrativo, potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.

INDICAZIONI

ZASPRAY è indicato come emolliente, idratante e lubrificante per l'occhio secco, specialmente in caso di allergia.

ZASPRAY allevia da prurito, irritazione, secchezza e rossore dell'occhio.

Solo per uso oftalmico.

CONTROINDICAZIONI

Non iniettare e non ingerire.

Non utilizzare ZASPRAY se è allergico ad uno qualsiasi dei suoi componenti (vedere descrizione del prodotto).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ZASPRAY è uno spray oculare lenitivo e lubrificante che contiene una soluzione liposomiale con il complesso PER-LIP (liposomi 4% + estratto di Perilla 0,5%), sodio ialuronato, acido bórico, sodio tetraborato decaidrato, PEG 300, EDTA sale bisodico biidrato, cloruro di sodio, acqua.

ZASPRAY è una soluzione sterile, senza conservanti, in flacone da 10ml con l'innovativo APF PLUS di APTAR (sistema spray multidose con tecnologia tip seal) che impedisce la contaminazione batterica durante tutta la durata del trattamento evitando l'utilizzo dei conservanti. L'assenza di conservanti fornisce protezione ai tessuti oculari evitando reazioni allergiche agli utilizzatori sensibili.

ZASPRAY è piacevole e semplice da usare, una valida alternativa per le persone che hanno difficoltà ad utilizzare le gocce oculari.

BENEFICI, PRESTAZIONI E MECCANISMO D'AZIONE

ZASPRAY allevia da prurito, irritazione, secchezza e rossore dell'occhio:

- Sensazione di freschezza
- Lenisce i sintomi degli occhi irritati
- Previene la disidratazione della superficie oculare
- Limita l'evaporazione di acqua dalla superficie oculare
- Ripristina il naturale equilibrio della superficie oculare e stabilizza il film lacrimale, che può essere alterato sia dalle condizioni ambientali quali allergeni, aria condizionata, vento, polvere, inquinamento sia dall'affaticamento degli occhi dovuto al prolungato uso delle lenti a contatto, del computer e alla luminosità non adeguata, ecc...

ZASPRAY può essere utilizzato in associazione a terapie antistaminiche.

ZASPRAY è ben tollerato dall'occhio.

Il sodio ialuronato si trova naturalmente nell'occhio.

Migliora la stabilità del film lacrimale e mantiene la superficie oculare lubrificata, idratata e protetta. Lo spray eroga i liposomi (componente oleoso come fosfolipide) nell'occhio, aiutando a riparare lo strato lipidico, esercita un'azione sulla instabilità lipidica, causa dell'occhio secco, alleviando l'irritazione e il fastidio dato dalle patologie oculari. La Perilla è un antiossidante che aiuta a contrastare l'accumulo di stress ossidativo.

L'azione combinata del complesso PER-LIP®(liposomi + Perilla) e sodio ialuronato aiuta a ripristinare e migliorare la stabilità del film lacrimale, mantenendo la superficie dell'occhio più idratata e lubrificata.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Dosaggio: si raccomanda di spruzzare il prodotto sulla palpebra chiusa uno o due volte per ogni applicazione, 3 o 4 volte al giorno per 3 o 4 giorni consecutivi.

Non utilizzare per più di 30 giorni consecutivi.

Non è necessaria alcuna formazione specifica per utilizzare ZASPRAY.

1. Lavare bene le mani prima dell'uso.
2. Rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso.
3. Mantenere stretto il flacone, con il pollice o l'indice sull'erogatore, e prestare attenzione a non chiudere con il dito il foro dell'erogatore. Mantenere il flacone a circa 10 cm dall'occhio.
4. Spruzzare sull'occhio chiuso, esercitando una pressione decisa sull'erogatore in modo che la soluzione venga nebulizzata.
5. Se necessario, ripetere anche sull'altro occhio.

PRECAUZIONI D'USO

Prodotto multiuso da utilizzare per un solo paziente.

Non condividere il flacone con nessuno per evitare contaminazioni.

Usare il prodotto solo se il confezionamento è integro alla prima apertura.

Non toccare l'erogatore con la superficie dell'occhio, per evitare contaminazioni.

Se i sintomi non migliorano o peggiorano, contattare il medico e/o lo specialista.

AVVERTENZE

Mantenere il prodotto lontano dalla vista e dalla portata dei bambini.

In caso di irritazione agli occhi, interrompere l'utilizzo e contattare il medico.

Se nota qualsiasi effetto collaterale o strana sensazione dopo l'utilizzo del prodotto, contatti un professionista sanitario e riporti l'informazione al distributore locale e al fabbricante (i contatti si trovano in fondo alle istruzioni d'uso).

CONDIZIONI DI SMALTIMENTO E CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto lontano da fonti di calore, in un posto asciutto e ad una temperatura tra 9°C e 25°C.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sul flacone e sull'astuccio.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese solo se il confezionamento rimane integro ed è stato conservato correttamente. Il prodotto può essere utilizzato fino a 90 giorni dopo la prima apertura. Successivamente il prodotto deve essere smaltito secondo le disposizioni locali.

Fabbricante

NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3
20124 Milano

Distributore

Thea Farma SpA
Via Tiziano, 32
20145 Milano

Ultima data di revisione del testo: 04/2021.

CLASSE	PREZZO AL PUBBLICO
CE 0459	€ 13,50

Garze sterili